

발열체크 키트 사용 설명서

1. 체온계



1) 귀속형 체온계 사용 주의사항

- ① 정확한 온도 측정은 귀를 당겨 귀가 일직선이 되도록 하고 측정합니다.
- ② 측정 대상자마다 알코올 솜으로 깨끗이 닦은 후 사용해야 합니다.
※ 타인이 사용한 체온계를 소독 없이 사용하면 감염위험에 노출될 수 있음.

2) 비접촉식 체온계

- ① 센서를 이마 중앙 또는 귀 뒤쪽에 대고, 기기를 2~3cm 떨어뜨려야 정확한 수치가 나옵니다.
- ② 이마에 땀이 나면 오차가 있을 수 있으므로 땀을 닦고 측정합니다.

2. 쉴드마스크 : 발열체크 시 체크자 사용

3. KF94 마스크 : 의심환자나 접촉자 발생 시 사용

4. 덴탈마스크 : 마스크 미착용학생 배포용

5. 멸균 글러브 : 발열 체크 시, 의심환자 접촉 시 사용

6. 손 소독제 : 손 소독용 (수시로 사용)

7. 살균소독수 : 비품 및 주변 환경 소독용 (수시로 사용)

8. 의료용 가운 : 의심환자 접촉 시 사용

9. 알코올솜 : 체온계 소독